



**Elektrischer  
Beinheber, Art.-Nr.  
2009-01  
Modell  
2012**



**Beim Einsatz des Geräts stets Vorsicht und Aufmerksamkeit walten lassen, um ein Überstrecken der gehobenen Extremität zu vermeiden. Die längeren Arme des Rollfußes zum Patienten hin platzieren, um Kippen oder Umstürzen des Beinhebers zu verhindern. Die Abbildungen können sich vom gelieferten Modell unterscheiden.**

### **Aufladung**

Das Gerät sollte mithilfe des mitgelieferten Ladegeräts regelmäßig, z. B. über Nacht, oder bei Aufleuchten der Anzeige "empty" (leer) geladen werden. Die Batterie ist voll aufgeladen, wenn die grüne Anzeige leuchtet. Der Notaus-Schalter (der rote Knopf) wird durch Eindrücken betätigt. Nach Drehen des Knopfes in Pfeilrichtung funktioniert das Gerät wieder normal.

Bei Stromausfall ist ein Absenken jederzeit durch Betätigen des Schalters "emergency down" (Not-Abwärts) möglich, der sich unter dem Steuerungskasten, neben dem Ladeanschluss befindet.



### **Bein heben am Fußgelenk**



Zum Heben von einem Bein des Patienten verwenden Sie das Hebeband mit der Art.-Nr. 2006-50. Den Beinheber so an der Längsseite des OP-Tisches aufstellen, dass sich der längere Teil des Rollfußes unter dem OP-Tisch befindet. Die Rollen (min. die beiden hinteren) arretieren und den Beinheber mit der Handsteuerung in die gewünschte Höhe fahren.

## Bein heben außen am Fuß



Zum Heben des Beins am Mittelfuß, das Hebeband mit der Art.-Nr. 2006-60 verwenden. Den Beinheber so an der Längsseite des OP-Tisches aufstellen, dass sich der längere Teil des Rollfußes unter dem OP-Tisch befindet. Die Rollen arretieren und den Beinheber mit der Handsteuerung in die gewünschte Höhe fahren.

Das Hebeband evtl. mit Klettband-Pflastern sichern (Art.-Nr. 2006-65), um ein Abgleiten vom Fuß des Patienten zu verhindern.



Klettband-Pflaster (Art.-Nr. 2006-65)

## Gleichzeitiges Heben beider Beine

Zum gleichzeitigen Heben beider Beine, die mitgelieferte Querstange am Beinheber anbringen. Hebeband 2006-50 oder alternativ 2006-60 verwenden. Den Beinheber so an der Längsseite des OP-Tisches aufstellen, dass sich der längere Teil des Rollfußes unter dem OP-Tisch befindet. Danach den Beinheber mit der Handsteuerung auf die gewünschte Höhe fahren.



## Heben in Bauchlage



Zum Heben in Bauchlage des Patienten, die mitgelieferte Querstange am Beinheber anbringen. Den Beinheber parallel so an der Längsseite des OP-Tisches aufstellen, dass sich der längere Teil des Rollfußes unter dem OP-Tisch befindet. Hebeband mit Art.-Nr. 2006-70 verwenden. Das lange Hebeband direkt über dem Knie am Oberschenkel anlegen, das kurze um Mittelfuß oder Fußgelenk.

**Den Beinheber mit einem weichen, fusselfreien Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Wenn gewünscht, die Oberflächen anschließend mit einem Desinfektionsmittel nachwischen.**

<b>Produkt</b>	<b>Artikelnummer</b>
Hebeband o./Klettband, min. 50 Stck.	2006-50
Hebeband m./Klettband, min. 50 Stck.	2006-60
Klettbandpflaster, Beutel mit 50 Stck.	2006-65
Hebeband für Bauchlage, 1 Satz	2006-70

Garantie 1 Jahr

Voraussichtliche Lebensdauer der Batterie ca. 3 Jahre.

Maximales Hebevermögen des Beinhebers: 250 kg – 100 kg (0 cm – 50 cm vom Zentrum). Zugfestigkeitsprüfung Hebeband 2006-50: max. 1262 N (ca. 125 kg)  
Zugfestigkeitsprüfung Hebeband 2006-60: max. 323N (ca. 30kg)

### **Hersteller:**

Opitek International, Naverland 1C, DK-2600 Glostrup, Danmark

Tel: +45 3966 1644, Fax: +45 3966 1655

[www.opitek-international.dk](http://www.opitek-international.dk) – [info@opitek-international.dk](mailto:info@opitek-international.dk)