

Elektrisk Benløfter

Bruksanvisning




Oppladning

Utstyret burde lades opp kontinuerlig f.eks over natten, med medfølgende adapter.

Batteriet er fulladet når grønt lys vises i indikatoren på fremsiden av benløfteren.



Sikkerhetsbryteren (den røde knappen) utløses når knappen trykkes inn. Det gjenoprettes full funksjon ved at man vrir knappen i pilens retning.

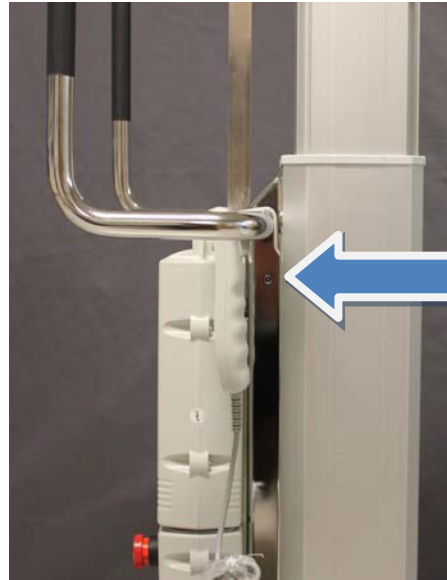

Inngangen til laderen er på høyre side av benløfteren.

Medfølgende standardtilbehør og dettes oppbevaring.



Følgende standardtilbehør er plassert på benløfterens venstre side:

- Løftearm for løft av et ben/arm.
- Tverrstang for bilaterale løft av ben.
- Forhøyningssinnsats som forhøyer høyeste punkt med 40 cm.

Anvendelse av benløfteren

Ved bruk av utstyret utvis forsiktighet så en overstrekking av pasientens ekstremiteter ikke skjer. Vær nøye med å plasere den lengste del av benløfterens hjul par (ben) under pasienten for å unngå at benløfteren velter

Løft i et ben eller arm

Ved løft i vristen av pasientens ene ben bruk bånd med artikkelnr: **2006-50**

Plasser benløfteren ved operasjonsbordet med de lengste ben under OP bordet.



Løft med hjelp av benløfterens håndkontroll til benet er på ønsket nivå og lås benløfterens bakre hjul for å sikre plasseringen.

Ved løft av pasienten i sideleie ved f.eks en hofteoperasjon, må det forsikres at pasientens kne ikke havner i en uønsket posisjon. Dette kan gjøres ved å justere foten/benet oppover.

For løft av arm benytt bånd med atikkelnr: **2006-50**.

Plasser benløfterens lengste ben under OP bordet og juster til ønsket høyde.


Lås benløfterens bakerste hjul for at sikre plassering.

Om pasienten plasseres sittende i f.eks en "beach chair" kan forhøyningsinnsatsen brukes for å oppnå ønsket høyde for vask av arm/armhule.

Plasser denne på samme sted som den ordinære løftearmen, som siden legges over på tilsatsen.

Dette gir en max høyde på benløfteren med ca 40cm.



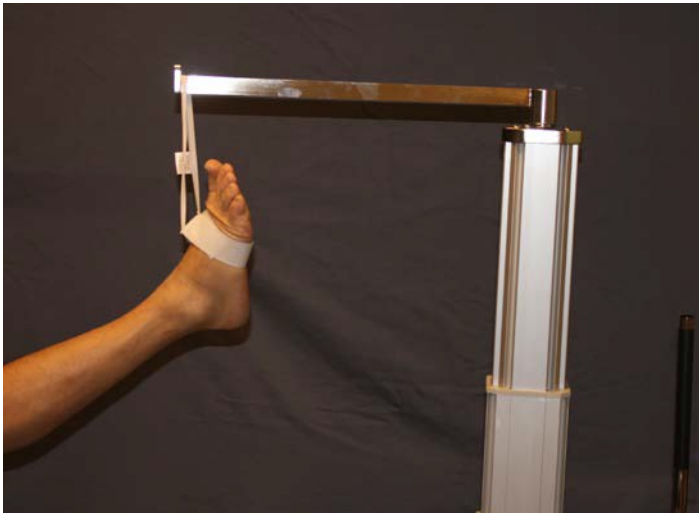

Ved løft av fotbladet på pasientens ene ben benytt bånd med artikkelnr: **2006-60**

Plasser benløfteren ved operasjonsbordet med de lengste ben under OP bordet. Løft ved hjelp av benløfterens håndkontroll til ønsket nivå og lås bakre hjul for å sikre plassering. Bandet kan muligens trenge en ekstra forsikring ved med velcro rondeller (artikkelnr: **2006-65**), slik at denne ikke glir av foten.



Velcro pads for 2006-60,
32mm ø
Safety locks, 50 pcs./ pack
Article no.: 2006-65

Ved bilateralt løft av pasientens begge ben, bruk det medfølgende tverrstangen ved å plassere den på løftearmen.

Benytt deretter bånd 2006-50, eller alternativt 2006-60 (evt. med 2006-65).

Plasser benløfteren ved operasjonsbordets fotende med de lengste ben under OP bordet.

Hev ben til ønsket nivå ved hjelp av benløfterens håndkontroll og lås bakerste hjul for å sikre plassering.



Ved løft når pasienten ligger i abdominal/ bukleie eller på siden (lateralt), bruk tverrstangen ved å plassere den på løftearmen.

Plasser benløfteren ved langsiden av operasjonsbordet på den operative siden med de lengste ben under OP bordet.

Benytt bånd med artikkelnr: **2006-70**. Det bredeste båndet plasseres proximalt rundt kneet og det smaleste plasseres rundt fotbladet, alternativt rundt ankelen.

Ved rengjøring av benløfteren benytt en myk klut med mildt rengjøringsmiddel og desinfisere til sist.

For sikker og smidig håndtering benytt følgende tilbehør:

Produkt	Artikkelnummer
Løftebånd for vrist 10st/FP	2006-50
Løftebånd for fot/fotblad velcro 10 st/FP	2006-60
Velcro Rondel, 50st/FP	2006-65
Løftebånd (1 set) for buklee 2st/FP	2006-70
Løftebånd, bred 1st/FP	2006-70-1

Reservedeler	Artikkelnummer
Adaptor	9097150008
Batteriboks	ZBA 142211
Håndkontroll	9097140015

- Garantitid 1 år
- Batteriets antatte levetid ca. 3 år
- Benløfterens maksimale løfte kapasitet: 100kg – 250kg (0cm – 50cm fra centrum)
- Trækstyrke test, løftebånd 2006-50: max. 1262 N (ca. 125kg)
- Trækstyrke test, løftebånd 2006-60: max. 323N (ca. 30kg)

Producent:

Opitek International, Danmark, www.opitek-international.dk, info@opitek.dk