

# Elektrisk Benlyft Artikel # 2009-01 Användarmanual




## Laddning

Utrustningen bör kontinuerligt laddas exempelvis över natt med den medföljande adaptorn. Batteriet är fulladdat vid grönt ljus från indikatorn på framsidan av lyften.



Säkerhetsströmbrytaren (den röda knappen) utlöses genom att knappen trycks in. Återställs genom att man vrider knappen i pilarnas riktning

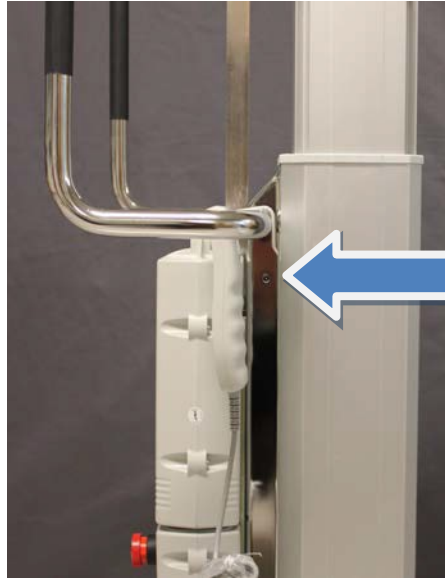

Ingången för laddaren finns på högersida av lyften.

## Medföljande standardtillbehör och dess förvaring



Följande standartillbehör finns placerade på lyftens vänstra sida.

- Lyftarm för lyft i ett ben/arm.
- Stag för bilaterala lyft av ben.
- Höjningstillsats som höjer högsta höjden med 40cm.

## ANVÄNDNING AV LYFTEN

**Vid användning av utrustningen iakttag försiktighet så att översträckning av patientens extremiteter ej sker. Var noga med att lyftens längre benpar placeras under patienten för att eliminera att lyften tippas.**

### Lyft i ett ben eller arm

Vid lyft i vrist av patientens ena ben använd band med artikelnr: **2006-50**.

Placera benlyften vid operationsbordet med det längre benparet under op. bordet.



Höj med hjälp av lyftens handkontroll benet till önskad nivå och lås lyftens bakre hjulpar för att säkra placering.


Vid lyft i patient i sidoläge för exempelvis en höftplastik. Passa då på patientens knä så att detta inte hamnar i oönskad flektion, detta kan göras genom att rotera foten/benet något uppåt.

För lyft av arm använd band med artikelnr: **2006-50**.

Placera lyften med de längre benparen under op. bordet och höj till önskad höjd. Lås lyftens bakre hjulpar för att säkra dess placering.

Om patienten är placerad sittande i exempelvis en "beach chair", kan höjningstillsatsen behöva användas för att uppnå önskad höjd för tvätt av arm/axel. Denna placeras då på samma plats som ordinarie lyftarm som sedan placeras ovan på tillsatsen. Detta höjer då max höjd på lyften med ca 40 cm.



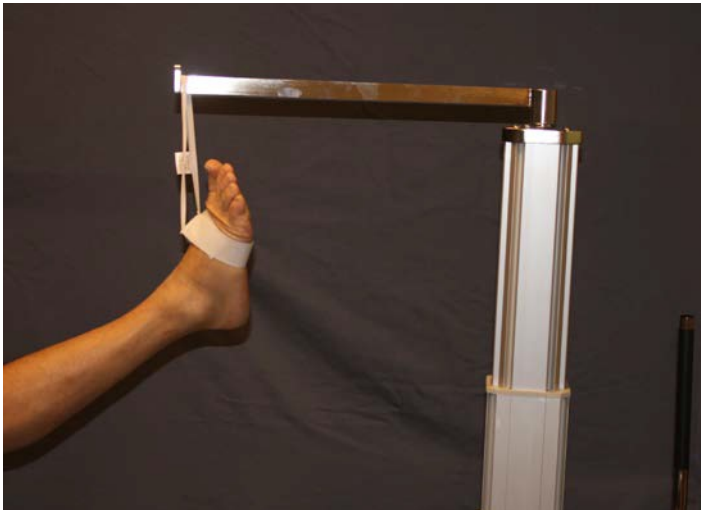

Vid lyft i hålfoten av patientens ena ben använd band med artikelnr: **2006-60**.

Placera benlyften vid operationsbordet med det längre benparet under op. bordet. Höj med hjälp av lyftens handkontroll benet till önskad nivå och lås lyftens- bakre hjulpar för att säkra placering. Eventuellt kan bandet behöva säkras med en kardborre pad (Velcro rondel, artikel 2006-65) så att detta ej glider av foten.



Vid bilateralt lyft av patientens båda ben använd det medföljande tvärstaget genom att placera det på lyftarmen.

Använd sedan band **2006-50** alternativt **2006-60**.

Placera benlyften vid operationsbordets fotända med det längre benparet under op. bordet.

Höj benen till önskad nivå med hjälp av lyftens handkontroll och lås lyftens bakre-hjulpar för att säkra dess placering.



Vid lyft i abdominal/bukläge samt sidoläge använd det medföljande tvärstaget genom att placera det på lyftarmen.

Placera benlyften vid operationsbordets långsida på den operativa sidan med det längre benparet under op. bordet.

Använd band med artikelnummer: **2006-70**. Det större bandet placeras proximalt om knäet och det mindre placeras i hålfoten alternativt runt ankeln.

**Vid rengörning av lyften använd en mjuk trasa med diskmedel,  
därpå ytdesinfektion.**

## **För ett säkert och smidigt handhavande använd följande tillbehör:**

<b>Produkt</b>	<b>Artikelnummer</b>
Lyftband för vrist 10 st/FP	2006-50
Lyftband för hålfot/ velcro fästning 10 st/FP	2006-60
Velcro Rondel, 50st/FP	2006-65
Løftebånd (1 set) for bukläge 2st/FP	2006-70
Lyftband för bukläge 1st/FP	2006-70-1
<b>Reservdelar</b>	<b>Artikelnummer</b>
Adaptor	9097150008
Batteribox	ZBA 142211
Handkontroll	9097140015

- Garantitid 1 år
- Batteriets uppskattade livslängd ca 3år
- Benlyftens max lyft kapacitet 100kg – 250kg (0cm – 50cm från lyft center)
- Drag test, lyftband 2006-50: max. 1262 N (ca. 125kg)
- Drag test, lyftband 2006-60: max. 323N (ca. 30kg)

### **Producent:**

**Opitek International, Danmark, [www.opitek-international.dk](http://www.opitek-international.dk), [info@opitek.dk](mailto:info@opitek.dk)**

